

Desinfectiemiddeldispensers op de juiste manier reinigen

► Onderhoudsinstructies voor dispensers uit de serie:



ingo-man® classic




ingo-man® plus




ingo-man® go

► Handmatige voorbereiding van de dispensers


1. Haal de fles uit de dispenser.
2. Haal de dispenser van de achterwand van de dispenser. Druk hiervoor op de vergrendelingslip aan de achterwand en schuif de dispenser naar boven eruit.

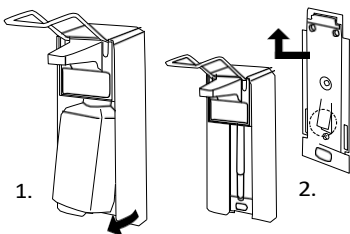

ingo-man® classic

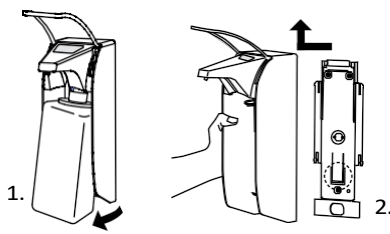


ingo-man® plus

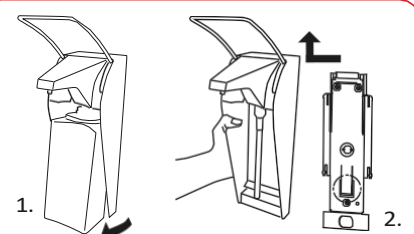


ingo-man® go


3. Verwijder de doseerpomp

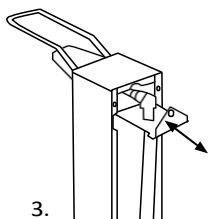

ingo-man® classic

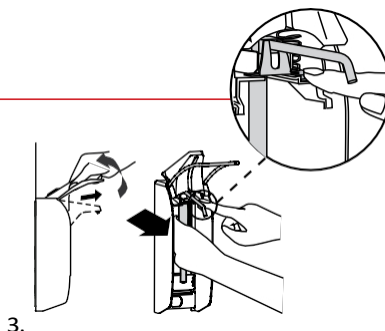

ingo-man® plus

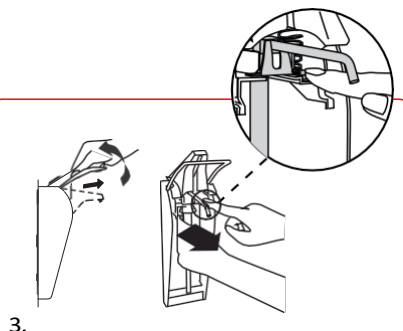

ingo-man® go

- Reinig de kap grondig onder stromend heet water totdat er geen productresten meer zichtbaar zijn.
- Reinig de onderdelen van de dispenser met vochtige wegwerpdoekjes.
- Besproei alle onderdelen van de dispenser met een alcoholhoudend oppervlakte-ontsmettingsmiddel en veeg ze indien nodig vervolgens af met wegwerpdoekjes; houd rekening met de inwerktijd.
- Plaats een nieuwe of een apart gereinigde doseerpomp (zie hieronder).
- Hang een nieuwe verpakking op en pomp de inhoud door.

► Handmatige reiniging van de pomp

- Spoel de pomp eerst door met heet water en spoel productresten weg.
- Pompen die zijn gebruikt voor het doseren van zeep, doorspoelen met handdesinfectiemiddel en 5 minuten laten inwerken.
- Pomp vervolgens leeg.
- Na volledige droging de pomp weer in gebruik nemen of stofvrij opslaan.
- Let op: Gebruik geen schuurmiddelen, bijtende of chloorhoudende reinigingsmiddelen!

► Machinale reiniging

- Dispensers en roestvrijstalen pompen uit de series ingo-man® classic / plus / go kunnen machinaal worden gereinigd.
- Als fabrikant raden wij aan deze reiniging jaarlijks uit te voeren (zie hiervoor ook „Reinigingsintervallen / Aanbevelingen”). Door het geoptimaliseerde reinigingsprogramma worden zeer goede reinigingsresultaten bereikt, terwijl de ingo-man®-dispenserbehuizingen tegelijkertijd maximaal worden ontzien. Uit uitgebreide tests bleek dat er zelfs na 20 reinigingscycli (wat overeenkomt met een levensduur van 20 jaar) geen veranderingen aan het oppervlak van de dispenserbehuizingen optraden.



Niet geschikt voor dispensers met **elektrische onderdelen**, zoals IMP Touchless of ingo-man® smart. Meer informatie en voorbereidende handelingen, zoals het verwijderen van de teller, staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.

► Autoclaveren

De **ingo-man® classic**-dispensers en roestvrijstalen pompen zijn autoclaveerbaar tot 121 °C.

Dispensers en roestvrijstalen pompen uit de **ingo-man® plus**-serie zijn autoclaveerbaar met parameters tot 134 °C, 2 bar en een maximale houdduur van 20 minuten.

Dispensers uit de **ingo-man® go**-serie zijn **niet** autoclaveerbaar. De bijbehorende roestvrijstalen pompen zijn autoclaveerbaar met parameters tot 134 °C, 2 bar en een maximale houdduur van 20 minuten.

De betreffende parameters voor de verschillende dispensertypes kunt u ook op onze website vinden.

► Reinigingsintervallen / aanbevelingen

Voorschriften met betrekking tot de eigenschappen en reiniging van dispensers zijn onder andere vastgelegd in de aanbeveling inzake handhygiëne van de Commissie voor Ziekenhuishygiëne van het Robert Koch-Instituut (www.rki.de) en in de aanbevelingen van de DGKH (www.dgkh.de), vereisten voor zeep- en desinfectiemiddeldispensers.

Als fabrikant raden wij aan om de dispenser jaarlijks volledig te reinigen. Daarnaast dient de behuizing van de dispenser regelmatig te worden gedesinfecteerd door middel van afvegen, conform uw hygiënevoorschriften.

Afhankelijk van het gebruikte middel is het vaker nodig om de pompen te reinigen. Met name wanneer de inhoud een hoog gehalte aan terugvetende stoffen bevat, moeten de afzettingen, vooral bij de uitloop, regelmatig grondig worden verwijderd.

Bij gebruik van zeep als vulmiddel is reiniging van de dispenser en de pomp vóór elke hervulling vereist.